

## Unité de soins intensifs Vetario – Nettoyage et entretien



**Pour une performance optimale de votre Vetario nous vous recommandons de lire ce guide de nettoyage et d'entretien et de l'afficher près de l'unité de soins intensifs.**

- Débranchez l'unité de soins intensifs de l'alimentation électrique et de l'alimentation en oxygène pendant le nettoyage. Risque de chocs électriques ! Assurez-vous que tous les composants électriques restent secs.
- Enlevez tous les déchets situés sur le sol de l'unité.
- Essuyez toutes les surfaces intérieures avec un chiffon doux imbibé de solution désinfectante Brinsea à base d'eau (à diluer conformément aux instructions du fabricant). Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool.
- L'extérieur de l'unité peut être nettoyé avec un chiffon humide.
- Il est important de bien rincer tout détergent ou désinfectant. L'enceinte ou les pièces de la porte peuvent devenir cassantes si des résidus ne sont pas bien rincés à l'eau courante.
- Les filtres de la S40, S50, T40M et T50M doivent être inspectés avant et après chaque utilisation et nettoyés si nécessaire. Ôtez les trois filtres et lavez-les à la main délicatement avec de l'eau tiède, laissez-les sécher avant de les utiliser. Les filtres doivent être remplacés tous les six mois. Il n'est pas possible de stériliser le bloc d'évaporation d'eau. Inspectez-le chaque semaine et remplacez-le s'il est sale.
- Nettoyez toujours l'unité avant de la ranger et faites la tourner pendant 24 heures pour vous assurer que l'unité est totalement sèche ou qu'aucun composant n'a été endommagé.
- Pour un nettoyage plus approfondi, le réchauffeur doit être enlevé afin de permettre le nettoyage de l'élément de chauffe et du ventilateur tous les 2 mois. Référez-vous au manuel d'utilisation de l'unité pour la marche à suivre. Si vous avez perdu votre manuel il peut être téléchargé gratuitement sur le site Vetario.
- Pour un nettoyage plus en profondeur, la base de l'enceinte et la porte peuvent être enlevées en détachant les fixations. La base de l'enceinte et la porte peuvent être nettoyées avec un détergent doux, puis désinfectées à l'aide d'un désinfectant à base d'eau.
- Des filtres de remplacement, des blocs d'évaporation (pour tous les modèles 40 et 50) et une solution désinfectante sont disponibles chez [www.vetario.co.uk](http://www.vetario.co.uk) pour les clients britanniques ou chez votre revendeur Vetario.