

## Vetario Unità di Terapia Intensiva - Cura e Pulizia



**Per ottenere il meglio dal tuo Vetario ti consigliamo di leggere la seguente guida alla cura e alla pulizia e di esporla vicino alla tua unità di terapia intensiva.**

- Scollegare l'unità di terapia intensiva dall'alimentazione di rete e dalla fornitura di ossigeno, ove applicabile, durante la pulizia. Rischio di scosse elettriche! Assicurarsi che tutte le parti elettriche siano mantenute asciutte.
- Rimuovere tutti i detriti dal pavimento.
- Pulire tutte le superfici interne con un panno morbido imbevuto di soluzione disinfettante per incubazione Brinsea 100:1. Se si utilizza una soluzione detergente alternativa, è meglio evitare soluzioni a base di alcol.
- L'esterno dell'unità di terapia intensiva Vetario può essere pulito con un panno umido.
- Assicurarsi che tutto il disinfettante sia stato accuratamente lavato via dalle parti in plastica con acqua pulita. Le soluzioni disinfettanti possono causare la rottura della plastica se non risciacquate correttamente.
- I filtri di S40, S50, T40M e T50M devono essere ispezionati settimanalmente e puliti se necessario. Rimuovere tutti e tre i filtri e lavarli delicatamente a mano in acqua tiepida, quindi lasciarli asciugare prima dell'uso. I filtri devono essere sostituiti ogni sei mesi circa. I blocchi di evaporazione devono essere sostituiti regolarmente.
- Pulire sempre l'unità di terapia intensiva Vetario prima di riporla e assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta all'interno e all'esterno, altrimenti potrebbero verificarsi danni ai componenti. Si consiglia di far funzionare Vetario per 24 ore prima di riporla per assicurarsi che i componenti siano completamente asciutti.
- Per una pulizia più approfondita, l'involucro del riscaldatore può essere rimosso in modo sicuro per consentire di spolverare il riscaldatore e la ventola - fare riferimento alle istruzioni del prodotto per informazioni dettagliate su come eseguire questa operazione. In caso di smarrimento delle istruzioni, queste possono essere scaricate gratuitamente dal sito Vetario.
- Per una pulizia più profonda la base del mobile e la porta possono essere rimosse svitando i fissaggi. L'esterno dell'armadio e la porta possono essere puliti con un detergente delicato e poi disinfettati con una soluzione disinfettante a base d'acqua come Brinsea Incubation Disinfectant. Risciacquare e asciugare accuratamente.
- Filtri di ricambio, blocchi di evaporazione (per tutti i modelli da 40 e 50) e soluzione disinfettante sono disponibili presso il tuo distributore Vetario. Disponibile anche su [www.vetario.co.uk](http://www.vetario.co.uk) per i clienti del Regno Unito.