

Oddziały intensywnej terapii Vetario – pielęgnacja i czyszczenie



W celu najlepszego wykorzystania Vetario, rekomendujemy przeczytanie poniższego przewodnika dotyczącego pielęgnacji i czyszczenia oraz umieszczenia go w dostępnym miejscu w pobliżu oddziału intensywnej terapii.

- Podczas czyszczenia odłącz jednostkę intensywnej terapii od zasilania sieciowego i dopływu tlenu. Uwaga! Istnieje ryzyko porażenia prądem! Upewnij się, że wszystkie części elektryczne są suche.
- Usuń wszystkie zanieczyszczenia z podłogi.
- Wytrzyj wszystkie powierzchnie wewnętrzne miękką ściereczką nasączoną roztworem 100:1 środka dezynfekującego Brinsea do inkubacji. Jeśli używasz alternatywnego środka czyszczącego, pamiętaj, aby unikać roztworów na bazie alkoholu.
- Obudowę jednostki intensywnej terapii Vetario można czyścić wilgotną ściereczką.
- Upewnij się, że cały środek dezynfekujący został dokładnie wypłukany z plastikowych części czystą wodą. Pamiętaj, że roztwory dezynfekujące mogą powodować pękanie plastiku, jeśli nie zostaną odpowiednio spłukane.
- Filtry w modelach S40, S50, T40M i T50M należy sprawdzać co tydzień i czyścić w razie potrzeby. Wyjmij wszystkie trzy filtry i delikatnie umyj ręcznie w ciepłej wodzie, a następnie pozostaw do wyschnięcia przed użyciem. Filtry należy wymieniać mniej więcej co sześć miesięcy. Bloki odparowujące należy regularnie wymieniać.
- Zawsze czyść Vetario ICU przed przechowywaniem i upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche wewnątrz oraz na zewnątrz, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów. Zaleca się uruchomienie Vetario na 24 godziny przed przechowywaniem, aby upewnić się, że elementy są całkowicie wysuszone.
- W celu dokładniejszego wyczyszczenia obudowy nagrzewnicy należy ją zdjąć bezpiecznie, aby następnie odkurzyć nagrzewnicę i wentylator — szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić, znajdują się w instrukcji produktu. Jeśli nie masz instrukcji, możesz ją bezpłatnie pobrać ze strony Vetario.
- W celu dokładniejszego wyczyszczenia podstawę szafki i drzwi można zdjąć, zwalniając elementy mocujące. Zewnętrzną część obudowy i drzwi można czyścić łagodnym detergentem, a następnie dezynfekować roztworem dezynfekującym na bazie wody, takim jak Brinsea Incubation Disinfectant. Spłucz dokładnie a potem osusz.
- Filtry wymienne, bloki odparowujące (dla wszystkich modeli w rozmiarze 40 i 50) oraz roztwór dezynfekujący są dostępne u dystrybutora Vetario. Dostępne są również na stronie www.vetario.co.uk dla klientów z Wielkiej Brytanii.