

Vetario T30

Stacja Intensywnej Opieki

Instrukcja Obsługi



Upoważniony przedstawiciel:
Authorised Rep Compliance Ltd.
Ground Floor, 71 Lower Baggot
Street, Dublin, D02 P593, Ireland



Przeczytaj instrukcję przed użyciem!



Nie zakrywaj!

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z tlenem. Stosowanie tlenu stwarza zagrożenie wystąpienia pożaru.

Urządzenie to może być używane wyłącznie z zasilaczem sieciowym dostarczonym wraz z urządzeniem. Użycie innego zasilacza sieciowego może spowodować niebezpieczeństwo. Aby transport zwierząt był możliwy, urządzenie może być również tymczasowo używane pod nadzorem w pojeździe, o ile jest podłączone do gniazdka o napięciu 12 wolt.

Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń.

Urządzenie, jego zasilacz i przewód zasilający muszą być umieszczone w pomieszczeniu zamkniętym, w którym nie są narażone na zachlapanie wodą oraz inne mokre warunki i chronione przed zwierzętami oraz stale być poza ich zasięgiem.

Naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Urządzenie to nie może być używane, czyszczone ani konserwowane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, bez należytego nadzoru. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.


Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego na czas czyszczenia. Upewnij się, że wszystkie części elektryczne są suche. Unikaj roztworów na bazie alkoholu i upewnij się, że wszystkie środki dezynfekujące na plastikowych częściach zostały dokładnie spłukane czystą wodą. Roztwory dezynfekujące mogą powodować poważne pękanie plastiku, jeśli nie zostaną należycie spłukane.

Spółka Brinsea Products Ltd i jej agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za śmierć zwierząt w przypadku awarii urządzenia z jakiegokolwiek powodu, dlatego zaleca się, aby użytkownik urządzenia wykupił własne ubezpieczenie na wypadek, gdyby utrata zasilania lub awaria mechaniczna lub elektryczna spowodowała niedopuszczalne straty.

Przed skonfigurowaniem Stacji Intensywnej Opieki T30 należy uważnie przeczytać tę instrukcję, aby uzyskać jak najlepsze wyniki i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Twoje urządzenie Vetario T30 zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikowi zmianę warunków inkubacji w celu dostosowania do szerokiego zakresu gatunków zwierząt w różnych warunkach otoczenia, a konkretna konfiguracja dla każdego gatunku wykracza poza zakres niniejszej instrukcji. Na rynku dostępnych jest wiele książek i tekstów weterynaryjnych dotyczących technik hodowli ptaków oraz ratowania zwierząt.

Abi zarejestrować nowy produkt Brinsea, w ciągu 30 dni od zakupu wejdź na stronę www.brinsea.co.uk i kliknij link na stronie głównej, aby zakwalifikować się do darmowej, wydłużonej do 3 lat gwarancji. Zapisz się do newslettera Brinsea, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i informacje.

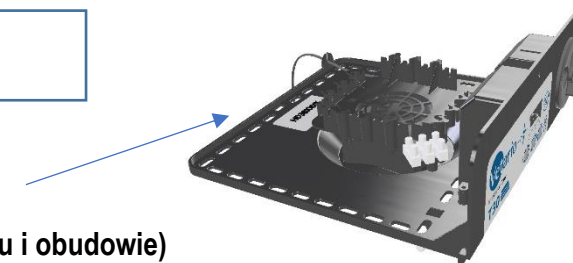

Tutaj zapisz numer seryjny swojego urządzenia _____

(patrz etykieta na opakowaniu i obudowie)

Vetario T30

SPIS TREŚCI

1	Odpakowywanie	4
2	Lokalizacja i Montaż	5
3	Funkcje	6
4	Menu Sterowania	7
5	Cyfrowy System Sterowania	8
6	Opieka Nad Małymi Zwierzętami	11
7	Czyszczenie	12
8	Specyfikacja	13
	Deklaracja Zgodności	14

Vetario T30

1 ODPAKOWYWANIE

Twoja Stacja Intensywnej Opieki Vetario T30 została dostarczona w opakowaniu ochronnym. Zdejmij wszystkie taśmy, wiązania i opakowania z inkubatora i części. Zachowaj karton i materiały opakowaniowe, aby umożliwić przepakowanie urządzenia.

Sprawdź, czy Twoje zasilanie elektryczne jest zgodne z oznaczeniem na zasilaczu.

Lista przedstawia wszystkie części, które zostały Ci dostarczone. Jeśli jakieś części są uszkodzone lub ich brakuje, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub firmą Brinsea Products (adres podany na końcu dokumentu). **Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń.**

1: Stacja Intensywnej Opieki Vetario T30

2: Zasilacz (PSU)

3: Kabel sieciowy

1.



2.



3.



Vetario T30

2 LOKALIZACJA I MONTAŻ

Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z produktem. Użycie innego zasilacza sieciowego może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i unieważni wszelkie gwarancje.

Podłącz złącze kabla zasilania T30 do złącza zasilacza.

Podłącz kabel zasilający do gniazda w zasilaczu. Musi być całkowicie wsunięty do gniazda.


Umieść zasilacz i kabel zasilający w wygodnym, suchym miejscu nad podłogą i z dala od zwierząt.

Twoja stacja T30 najlepsze rezultaty daje w ogrzewanym pomieszczeniu wolnym od dużych wahań temperatury i z dobrą wentylacją, szczególnie jeśli kilka inkubatorów pracuje jednocześnie. Najlepsza temperatura otoczenia jest między 20 a 25°C (68 a 77°F). Nie pozwól, aby temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej 15°C (59°F).

Stacje Intensywnej Opieki T30 można układać w stosy (maksymalnie 2 jednostki). Nóżki górnej jednostki powinny się zablokować na słupkach dolnej jednostki.

TRANSPORT ZWIERZĄT



Stacja Vetario T30 może być również używana w pojeździe pod nadzorem do transportu zwierząt. Podłącz do dodatkowego 12-woltowego gniazdko (lub zapalniczki) za pomocą przewodu adaptera o numerze 15.45 od firmy Brinsea Products. Urządzenie najbezpieczniej jest przewozić mocno przymocowane w bagażniku lub mocno przymocowane do podłogi pojazdu, tak aby nie zakłócało działania jakichkolwiek elementów sterujących pojazdu. Kierowca nie może być rozpraszany przez zwierzęta lub stację T30.

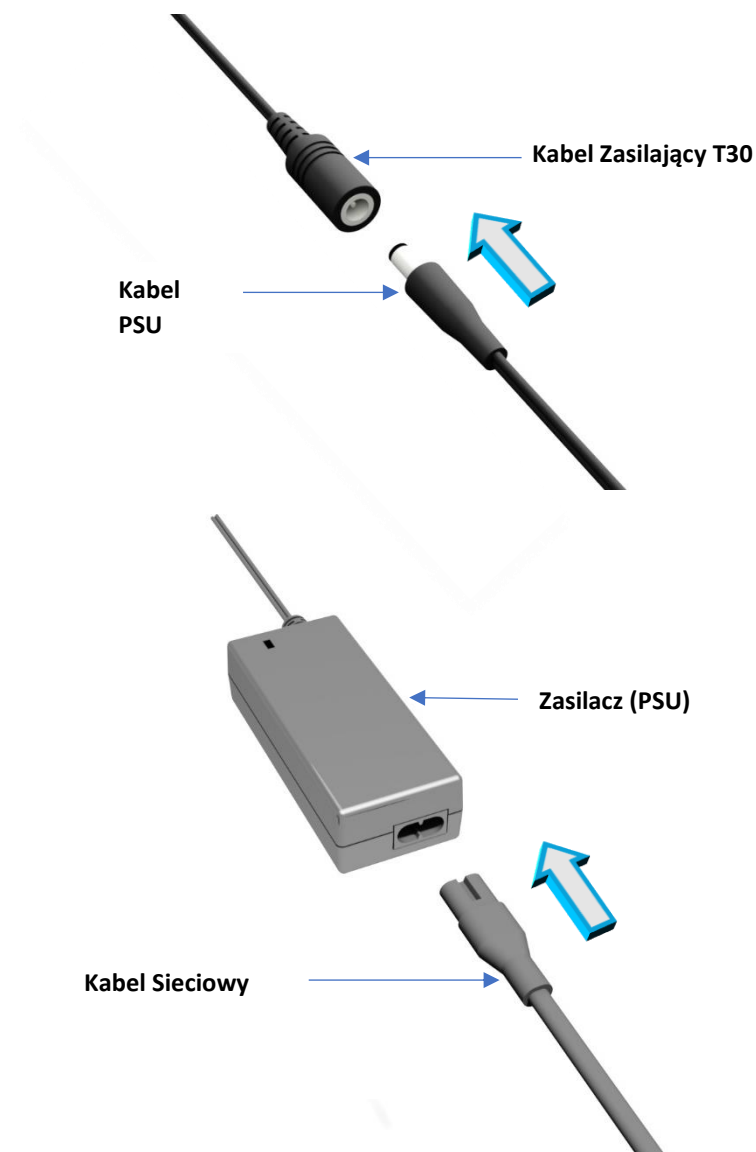

Vetario T30

3 FUNKCJE

- 1: Zdejmowana Obudowa
- 2: Cyfrowy Wyświetlacz Temperatury
- 3: Przyciski Sterujące
- 4: Regulowany Odpowietrznik
- 5: Dwuścienna Szafka
- 6: Drzwi
- 7: Zatrzask Drzwi
- 8: Integralny Uchwyt do Przenoszenia
- 9: Słupki do Układania

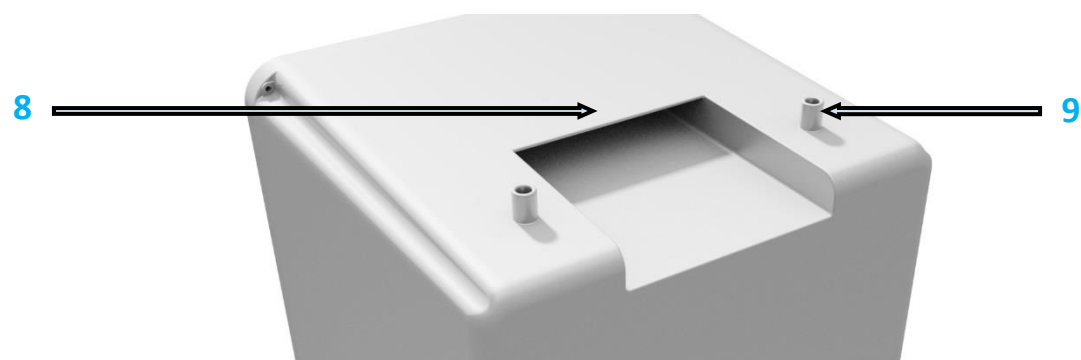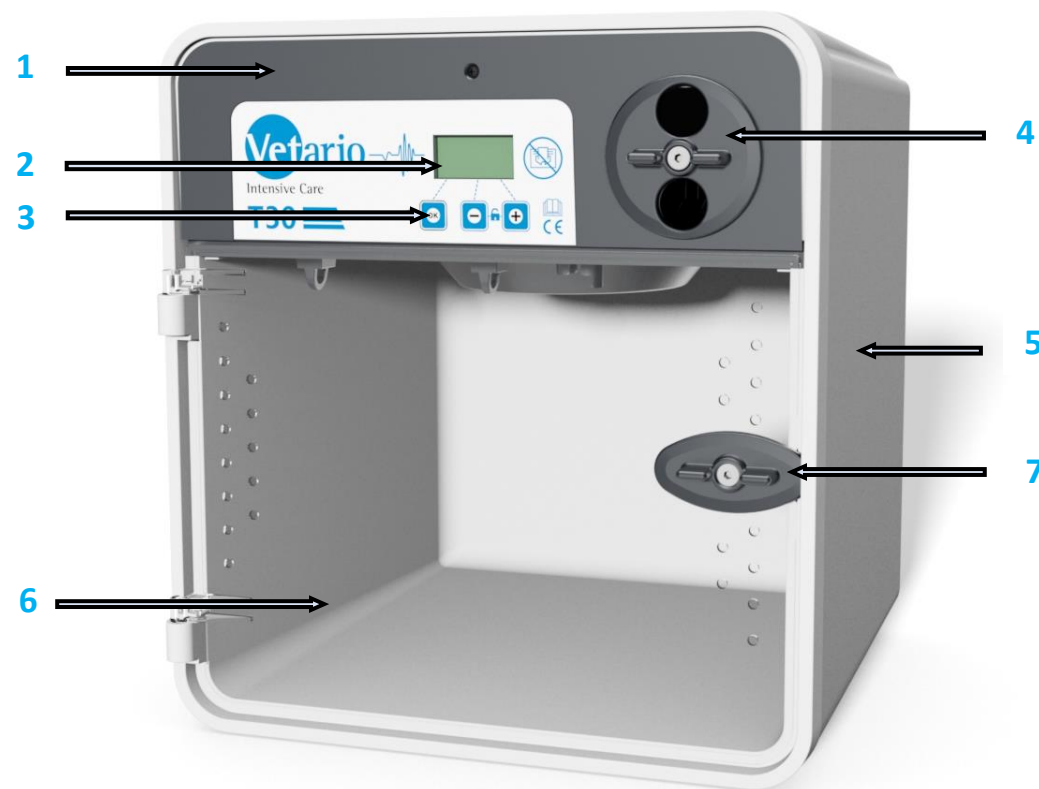

Vetario T30

4 MENU STEROWANIA

Schemat po prawej ilustruje jak korzystać z menu sterowania. Spójrz na poniższe klawisze, aby zrozumieć, co dzieje się po ich naciśnięciu.



Naciśnij oba przyciski, aby odblokować menu.




Wybierz opcję/wrót do menu.



Przejdź o jedną stronę do przodu/zwiększ wartość/wyświetl w Celsjuszach.



Cofnij się o jedną stronę/zmniejsz wartość/wyświetl w Fahrenheitach.

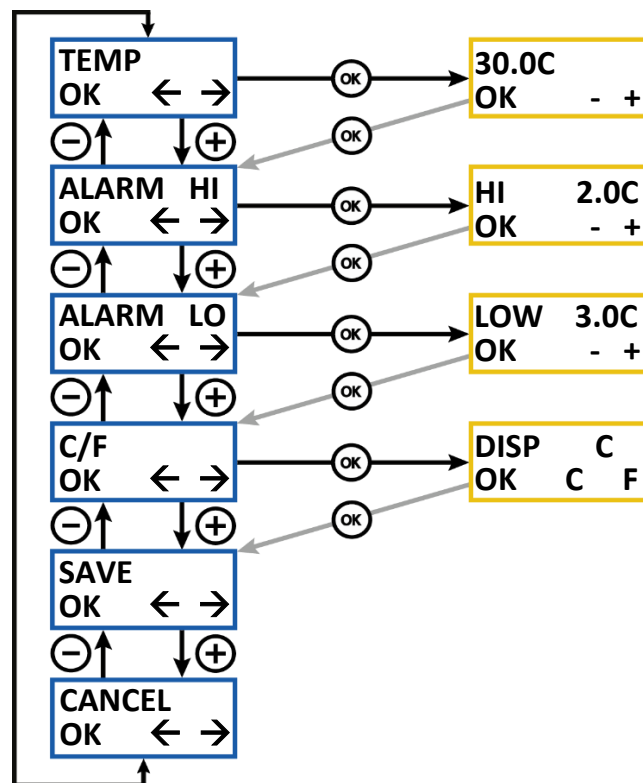

TEMPERATURA INKUBACJI

Zakres 20.0 - 38.0°C (68.0 - 100.4°F).
Domyślna 30.0°C (86.0°F). Zobacz sekcję 5.

ALARM ZBYT WYSOKIEJ TEMPERATURY

Zakres 1.0 - 5.0°C (1.8 - 9.0°F) powyżej temperatury inkubacji.
Domyślna 2.0°C (3.6°F). Zobacz sekcję 5.

ALARM ZBYT NISKIEJ TEMPERATURY

Zakres 1.0 - 5.0°C (1.8 - 9.0°F) poniżej temperatury inkubacji.
Domyślna 3.0°C (5.4°F). Zobacz sekcję 5.

WYŚWIETLACZ W CELSIUSZACH/FAHRENHEITACH

Przełącza wartości temperatury pomiędzy °C i °F.
Domyślna °C. Zobacz sekcję 5.

ZAPISZ

Wszystkie zmiany są zapisywane. Powrót do ekranu normalnej pracy.

ANULUJ

Wszystkie zmiany są ignorowane. Powrót do ekranu normalnej pracy.

Vetario T30


5 CYFROWY SYSTEM STEROWANIA

System sterowania Vetario T30 wykorzystuje bardzo dokładny, indywidualnie skalibrowany czujnik temperatury. Uważaj na porównania odczytów na wyświetlaczu z tymi na termometrach analogowych i cyfrowych.

T30 szybciej osiągnie idealną temperaturę, jeśli regulowany odpowietrznik zostanie obrócony do pozycji zamkniętej (na zdjęciu). Następnie odpowietrznik można obrócić do wymaganego ustawienia, aby wzmocnić wentylację. Może być to konieczne do utrzymania niskich temperatur w ciepłym otoczeniu lub w przypadku opieki nad większym zwierzęciem.

Pamiętaj, że stacja T30 może kontrolować temperaturę tylko w zakresie około 3°C temperatury pokojowej. Nie jest w stanie schłodzić powietrza.

Po ustaleniu właściwej temperatury i wyregulowaniu otworu wentylacyjnego, stacja T30 jest gotowa do użycia.

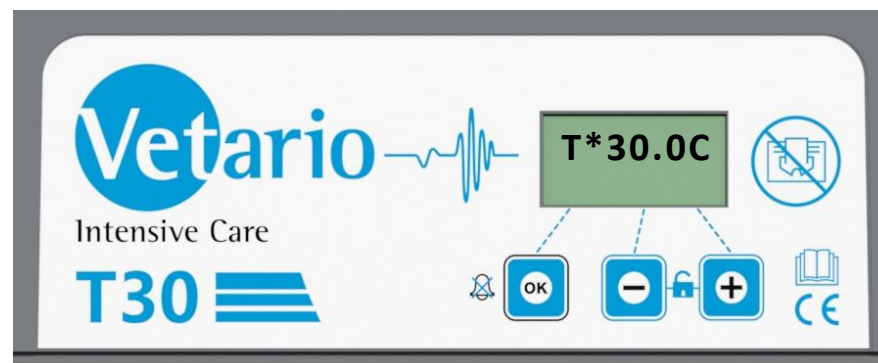

Vetario T30

5 CYFROWY SYSTEM STEROWANIA




Naciśnij oba przyciski, aby odblokować menu.

(RYS 1)



(RYS 2)

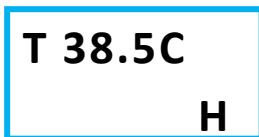

(RYS 3)



Normalna Praca - Temperatura jest stale wyświetlana

- Gwiazdka "*" obok odczytu temperatury pokazuje, kiedy nagrzewnica jest włączona. Podczas nagrzewania gwiazdka będzie świecić w sposób ciągły, a po podgrzaniu gwiazdka będzie powoli migać, jako że nagrzewnica będzie pulsować, aby utrzymać prawidłową temperaturę. Podczas zmniejszania temperatury gwiazdka może zgasnąć, co jest normalne.

Zmiana Ustawień - Menu Sterowania umożliwia modyfikowanie i zapisywanie różnych ustawień. Wszystkie ustawienia są zachowywane w przypadku odcięcia zasilania.

- Aby uzyskać dostęp do Menu Sterowania, naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby odblokować wyświetlacz.

Wyświetlacz Utraty Zasilania (RYS. 1) - Jeśli zasilanie zostało przerwane z powodu odcięcia (lub przy pierwszym włączeniu), w rogu wyświetlacza zacznie migać symbol "P". Naciśnij OK i trzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć ten wskaźnik. Jeśli przyczyna utraty zasilania nie jest znana, sprawdź, czy połączenia kabla zasilającego są prawidłowe.

Wyświetlacz Alarmu Wysokiej Temperatury Inkubacji (RYS 2) - Jeśli zmierzona temperatura wewnątrz stacji T30 wzrośnie o więcej niż wartość na ekranie ALARM HI, alarm natychmiast się włączy i wyświetli się "H". Naciśnij OK, aby wyciszyć alarm na 30 minut.

- Jeśli problem z wysoką temperaturą sam się rozwiąże, na wyświetlaczu pozostanie "H", aby pokazać, że coś takiego miało miejsce. Naciśnij OK, aby wyczyścić wskaźnik. Sprawdź, czy stacja T30 nie jest (i nie była) wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub zbyt blisko źródła ciepła, takiego jak pokojowy grzejnik.

Wyświetlacz Alarmu Niskiej Temperatury Inkubacji (RYS 3) - Jeśli zmierzona temperatura wewnątrz stacji T30 spadnie o więcej niż wartość na ekranie ALARM LO, to po 60 minutach wyświetli się "L" i włączy się alarm. Naciśnij OK, aby wyciszyć alarm na 30 minut.

- Jeśli problem z niską temperaturą sam się rozwiąże, na wyświetlaczu pozostanie "L", aby pokazać, że coś takiego miało miejsce. Naciśnij OK, aby wyczyścić wskaźnik. Sprawdź, czy w inkubatorze nie ma (i nie było) zimnego przeciągu i czy temperatura w pomieszczeniu znacząco nie spada.

Vetario T30

5 CYFROWY SYSTEM STEROWANIA


(RYS 4)

T*30.0C
-RM

(RYS 5)

T 30.0C
+RM

Ustawianie Temperatury:

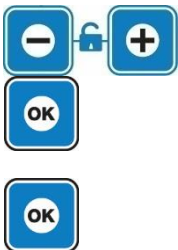

1. Naciśnij jednocześnie przyciski - i +, aby odblokować menu główne.
2. Naciśnij OK, aby wybrać ekran temperatury i dostosuj w razie potrzeby za pomocą przycisków + i -.
3. Naciśnij OK, aby powrócić do Menu Głównego, a następnie przewiń w celu ZAPISU. Naciśnij OK, aby zapisać zmiany.

Podczas obniżania temperatury gwiazdka może zgasnąć, gdy inkubator stygnie - jest to normalne.


Alarm Niskiej Temperatury w Pomieszczeniu (RYS 4) - Jeśli obliczona temperatura pomieszczenia przez ponad 1 godzinę pozostaje zbyt niska dla uzyskania optymalnych wyników, wyświetlane jest ostrzeżenie "-RM" i włącza się alarm. Naciśnij OK, aby wyciszyć alarm na 30 minut.

- Jeśli problem z niską temperaturą sam się rozwiąże, na wyświetlaczu pozostanie "-RM", aby pokazać, że coś takiego miało miejsce. Naciśnij OK, aby wyciszyć ten wskaźnik.
- Sprawdź, czy w stacji T30 nie ma (i nie było) zimnego przeciągu i czy temperatura w pomieszczeniu znacząco nie spada.

Alarm Wysokiej Temperatury w Pomieszczeniu (RYS 5) - Jeśli obliczona temperatura w pomieszczeniu przez ponad 1 godzinę pozostaje zbyt wysoka dla uzyskania optymalnych wyników, wyświetlane jest ostrzeżenie "+RM" i włącza się alarm. Naciśnij OK, aby wyciszyć alarm na 30 minut.

- Jeśli problem z wysoką temperaturą sam się rozwiąże, na wyświetlaczu pozostanie "+RM", aby pokazać, że coś takiego miało miejsce. Naciśnij OK, aby wyłączyć wskaźnik.
- Sprawdź, czy stacja T30 nie jest (i nie była) wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub zbyt blisko źródła ciepła, takiego jak pokojowy grzejnik. Ponadto zwierzęta same wytwarzają dużo metabolicznego ciepła, więc mogą zwiększać temperaturę, jeśli temperatura w pomieszczeniu już jest wysoka.

Zmiana wyświetlania na Fahrenheity:

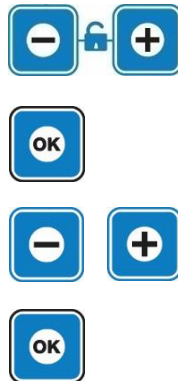

1. Naciśnij jednocześnie przyciski - i +, aby odblokować menu główne.
2. Przejdź do opcji C/F i naciśnij OK, aby wybrać ekran wyświetlania C/F.
3. Naciśnij przycisk +, aby wybrać °F lub przycisk -, aby wybrać °C.
4. Naciśnij OK, aby powrócić do Menu Głównego. Naciśnij ponownie OK, aby zapisać zmiany.

Vetario T30

6 OPIEKA NAD MAŁYMI ZWIERZĘTAMI

Tvoja stacja Vetario T30 została specjalnie zaprojektowana do opieki nad rannymi lub chorymi małymi zwierzętami. Przy opiece nad zwierzętami przestrzegane muszą być zalecenia i porady udzielone przez lekarza weterynarii.

Pierwszym etapem leczenia przeziębionego zwierzęcia (hipotermii) jest zapobieganie dalszej utracie ciepła poprzez owinięcie poszkodowanego materiałami izolacyjnymi, takimi jak koce, folia bąbelkowa lub srebrna folia. Zaleca się wstępne podgrzanie stacji T30 i ustabilizowanie temperatury przed włożeniem do niej młodych ptaków lub małych zwierząt. Jeśli spodziewasz się przybycia zwierzęcia, włącz stację T30, aby była gotowa do natychmiastowego użycia.

Po podgrzaniu stacji T30 do odpowiedniej temperatury zwierzę może zostać przeniesione. Na tym etapie należy zmniejszyć ilość ściółki, aby umożliwić dostawanie się do stacji T30 ciepła z otoczenia. Wszystkim zwierzętom przyda się jednak ściółka, gdyż pomoże ona zmniejszyć zabrudzenia. Małe zwierzęta, takie jak młode lisy czy borsuki, mogą skorzystać na posiadaniu miękkiej zabawki do towarzystwa, podczas gdy pojedyncze kaczątka lub pisklęta bażantów skorzystają na posiadaniu lusterka. Dzięki zwierzęta mogą stać się bardzo niespokojne w towarzystwie ludzi. Trzymaj stację T30 tam, gdzie niepokoję są minimalne.

Wszystkie małe ssaki i ptaki skorzystają na przebywaniu w temperaturze otoczenia w ich "termoneutralnym zakresie". Jest to zakres temperatur, w których zwierzę nie zużywa energii na utrzymanie temperatury swojego ciała. Temperatuty termoneutralne dla typowych dorosłych ssaków i ptaków podano w tabeli 1. W przypadku ptaków zakres termoneutralny zależy od ich wielkości, przy czym mniejsze ptaki wymagają wyższych temperatur. Gady i płazy powinny być trzymane w "zakresie aktywnych temperatur" (ATR), w których mogą kontrolować temperaturę swojego ciała. Wartości ATR dla typowych gadów i płazów również podano w tabeli 1.

Dorośle zwierzęta będące w hipotermii należy ogrzewać w stacji T30 ustawionej na zakres termoneutralny. Temperatura stacji T30, jak i zwierzęcia powinna być rejestrowana w regularnych odstępach czasu. Należy prowadzić monitorowanie i obserwację zwierzęcia czy nie wykazuje ono oznak niepokoju, np. sapanie lub dreszcze. Zwierzęta mogą być również odwodnione i/lub 'w szoku' (wstrząs oligowolemiczny), więc samo ogrzanie nie naprawi tych rzeczy, a może je jeszcze pogorszyć. Wszystkim dorosłym zwierzętom należy zapewnić odpowiednią płynno-terapię w tym samym czasie, co ogrzewanie i opiekę weterynaryjną (osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnych Standardowych Procedur Operacyjnych).

Zranione zwierzęta wymagają również środków przeciwbólowych (analgeza), które może przepisać lekarz weterynarii.

Jeśli zwierzę będzie pić, w płytkiej misce można podać doustny płyn nawadniający. Jeśli zwierzę nie chce lub nie może pić, należy podać płyn w inny sposób. U ptaków płyny nawadniające najłatwiej można podać przez rurki do karmienia, pod warunkiem, że ptak jest w stanie podnieść głowę i przełknąć. Do nawodnienia ssaków zwykle wymagane są płyny dożylnie lub śródkostne. Mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii lub pielęgniarkę weterynarii.

Słabe zwierzę należy karmić tylko wtedy, gdy jest ogrzane i tylko płynami. Nie umieszczaj wilgotnej, stałej żywności w stacji, ponieważ szybko się zepsuje z powodu ciepła w otoczeniu.

Zwierzęta zależne (te, które naturalnie byłyby w gnieździe) powinny być trzymane w stacji T30 w temperaturze 28-32°C (82-90°F), aż osiągną wiek, w którym będą w stanie utrzymać własną temperaturę ciała, kiedy ciepło może zostać zredukowane do ich zakresu termoneutralnego. Uważnie obserwuj ich zachowanie pod kątem oznak dyszenia lub drżenia, co pomoże określić najlepszą dla nich temperaturę na tym etapie. Bardzo małe zwierzęta mogą wymagać stworzenia w stacji T30 'gniazda' ze sztucznej tkaniny, wyłożonego papierowym ręcznikiem.

Podobnie jak zwierzęta dorosłe, młode zwierzęta po przybyciu są często odwodnione i powinny być karmione doustnym roztworem z elektrolitów. Często mają również niski poziom glukozy we krwi (hipoglikemia), więc wkrótce po początkowym podaniu elektrolitów powinny być odpowiednio nakarmione. Jeśli zwierzę nie jest w stanie podnieść głowy i/lub przełykać, należy podać mu płyny i glukozę w formie zastrzyku pod nadzorem lekarza weterynarii.

Tabela 1. Typowe zakresy temperatur termoneutralnych i aktywnych (ATR)

Gatunek:	Zakres temperatur:
Ssaki	15 - 20°C (59 - 68°F)
Średnie i Duże Ptaki	15 - 25°C (59 - 77°F)
Małe Ptaki	20 - 30°C (68 - 86°F)
Bardzo Małe Ptaki	25 - 35°C (77 - 95°F)
Gady	20 - 30°C (68 - 86°F)
Płazy	15 - 30°C (59 - 86°F)

Vetario T30

7 CZYSZCZENIE

Odłącz zasilacz od zasilania sieciowego.

Nie zanurzaj stacji. Można ją czyścić, oddzielając część wewnętrzną od zewnętrznej. Nie dokręcaj zbyt mocno śrub mocujących.

Nigdy nie myj części stacji płynami o temperaturze powyżej 50°C (120°F). Nie używaj zmywarki do czyszczenia jakichkolwiek części.

Zawsze dokładnie wszystko spłucz, ponieważ środki czyszczące/dezynfekujące mogą po dłuższym kontakcie uszkodzić plastik. Unikaj roztworów na bazie alkoholu.

Po każdym użyciu stacji T30 usuń wszelkie zabrudzenia z podłogi. Wytrzyj wszystkie powierzchnie wewnętrzne wilgotną szmatką nasączoną roztworem. Użyj roztworu środka dezynfekującego na bazie wody (rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta).

Zewnętrzną część stacji T30 można wyczyścić wilgotną szmatką z roztworem dezynfekującym, a następnie dokładnie spłukać.

Demontaż:



1: Otwórz drzwi na co najmniej 90 stopni. Podnieś drzwi (jak na zdjęciu), aby wyjąć je z zawiasów szafki.

2: Zdejmij obudowę, naciskając w pokazanym miejscu w kierunku do góry, jednocześnie wysuwając tacę do siebie. Przewód zasilający można przeciągnąć przez otwór na kabel.



3: Aby z powrotem zamontować, przełóż przewód zasilający T30 przez otwór z tyłu obudowy i delikatnie przeciągnij.

4: Wsuń obudowę z powrotem na miejsce i 'zatrzasknij'. Podczas wsuwania obudowy upewnij się, że przewód zasilający jest napięty, aby zapobiec jego uszkodzeniu/uwięzieniu.

5: Zamontuj ponownie drzwi, wsuwając zawiasy drzwi w szafę.

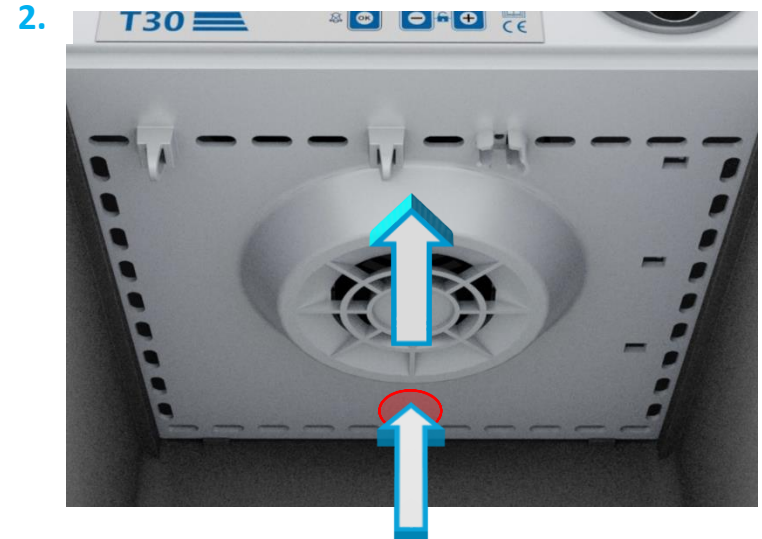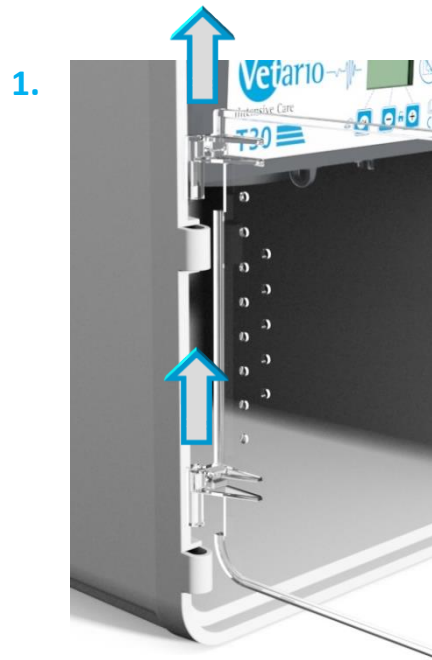

NACIŚNIJ TUTAJ I PRZESUŃ DO PRZODU

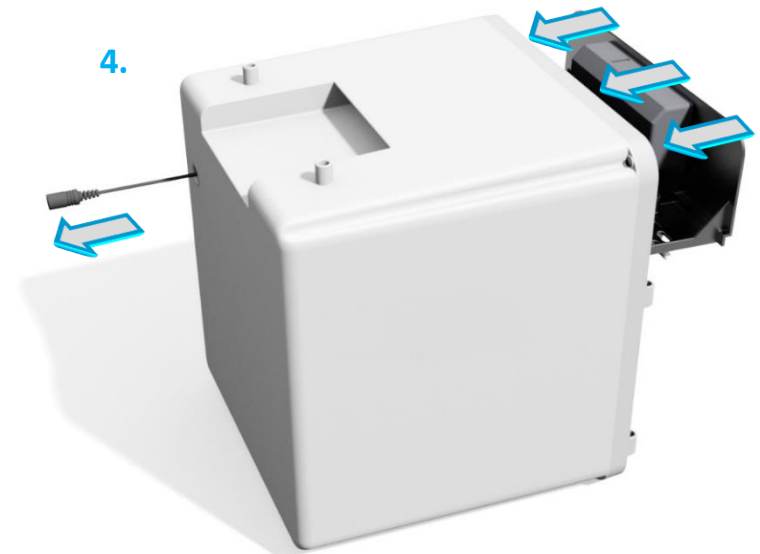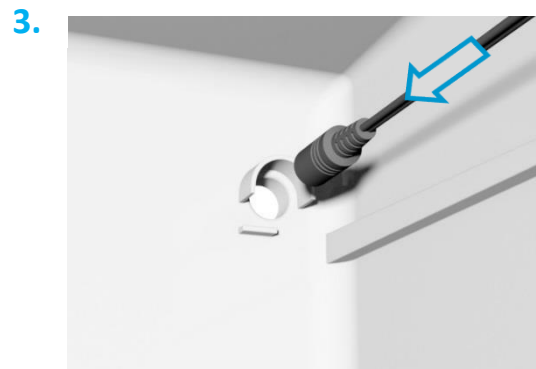

Vetario T30

8 SPECYFIKACJA

Całkowita Wysokość: 297mm (11 ¾ cala)

Całkowita Szerokość: 270mm (10 ½ cala)

Całkowita Głębokość: 275mm (10 ¾ cala)

Powierzchnia Podstawy: 240mm x 240mm (9 ⅓ x 9 ⅓ cala)

Efektywna objętość: 9.5 litrów (2.5 galonu)

Waga: 2.1 kg (4.6 funta)

Pobór Energii:

Maksymalny 36 Watów

Typowa średnia 18 Watów

Zasilanie Elektryczne: 230V, 50/60Hz.



Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać ze zwykłymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego przetwarzania, odzysku i recyklingu należy zanieść ten produkt do wyznaczonego punktu zbiórki, w którym zostanie on przyjęty za darmo.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie takiej zbiórki.

Właściwa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec wszelkim potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska, które w przeciwnym razie mogłyby wystąpić w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami.



Deklaracja zgodności UE

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 768/2008/WE załącznik III

1. Model produktu / produkt:

Produkt: Inkubatory dla zwierząt
Model: Brinsea TLC-30 Eco (numer seryjny HD380/xxxxxxxx)
Brinsea TLC-30 Advance (numer seryjny HD381/xxxxxxxx)
Vetario S30 (numer seryjny HD430/xxxxxxxx)
Vetario T30 (numer seryjny HD440/xxxxxxxx)

2. Producent:

Nazwa: Brinsea Products Ltd.
Adres: 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, BS24 9BG, England

Upoważniony przedstawiciel:

Nazwa: Authorised Rep Compliance Ltd.
Adres: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

3. Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

Produkt: Inkubatory dla zwierząt Vetario T40M i T50M
Specyfikacja: 220-240V, 50Hz, 160W, 'T40M' 470 x 485 x 385mm, 'T50M' 550 x 690 x 490mm.

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym:

2006/42/EC Dyrektywa Maszynowa
2014/30/EU Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
2011/65/EU Dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania pewnych substancji niebezpiecznych (RoHS)

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60335-1:2012+A15:2021 EN 60335-2-71:2003+A1:2007
EN 60601-1:2006+A2:2021 EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:1997+A2:2008 EN IEC 63000:2018

7. Dokumentacja techniczna produktu jest dostępna u upoważnionego przedstawiciela pod powyższym adresem.

Podpisano na rzecz i w imieniu: Brinsea Products Ltd.
Miejsce wydania: Weston-super-Mare
Data wydania: 18 March 2024
Imię i nazwisko: Ian Pearce
Stanowisko: Managing Director
Podpis:

Brinsea Products Ltd

32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG
Tel: +44 (0) 345 226 0120
e-mail : support@vetario.co.uk
website: www.vetario.co.uk